

Oticon | Streamer

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STREAMER 1.4

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ STREAMER 1.4

 **Bluetooth®**





oticon
PEOPLE FIRST

Содержание

<u>Перевод звонка на мобильный телефон</u>	<u>4</u>
<u>Начать беспроводную передачу аудио от Streamer</u>	<u>5</u>
<u>Подключение ConnectLine Microphone через Streamer</u>	<u>6</u>
<u>Индикатор Связь/Bluetooth постоянно вспыхивает и затухает</u>	<u>7</u>


Перевод звонка на мобильный телефон

Большинство мобильных телефонов поддерживают функцию перевода звонка.

Долгое нажатие	Долгое нажатие на кнопку телефона, во время разговора, переведет разговор на мобильный телефон. Это будет обозначено миганием кнопки телефона. Последующее долгое нажатие переведет звонок обратно на Streamer. Перевод звонка на мобильный телефон обычно должно быть подтверждено на мобильном телефоне.	
Краткое нажатие	Краткое нажатие закончит разговор, переведя его обратно на мобильный телефон.	

Начать беспроводную передачу аудио сигнала от Streamer


Если Streamer был согласован с источником A2DP (н.п. MP3, ПК или проигрыватель).

Долгое нажатие (> 0.5 сек)	Начнет передачу звука от согласованного источника аудио сигнала (A2DP).	
Краткое нажатие (< 0.5 сек)	Прекратит передачу звука от включенного источника сигнала.	

Дополнительную информацию о передаче звука смотрите в разделе 6.4 Инструкции по эксплуатации – Streamer 1.2.

Подключение ConnectLine microphone через Streamer





Если Streamer был согласован с ConnectLine Microphone, и он находится в диапазоне действия во включенном состоянии.

Двойное нажатие	Начнет/возобновит передачу звука от ConnectLine Microphone.	
Краткое нажатие	Прервет передачу звука от ConnectLine Microphone.	

Дополнительную информацию о ConnectLine Microphone читайте в Инструкции по эксплуатации ConnectLine Microphone.

Индикатор Связь/Bluetooth постоянно вспыхивает и гаснет

Если Связь включена, индикатор Связи будет вспыхивать и гаснуть, если не включена блокировка клавиатуры (виден зеленый индикатор).

Открыто 	Индикатор Связи продолжает вспыхивать и гаснуть.	
Блокировано 	Индикатор Связи выключен. Кнопка телефона и аудио имеет 25% яркости.	

People First

People First – это наше обещание
дать людям возможность
свободно общаться, естественно
взаимодействовать и активно
участвовать в жизни



0000110356000001



MIX
Paper
FSC® C043970

oticon
PEOPLE FIRST